

PRODUCTO

VibeX Xtra

COMPOSICIÓN

Riboflavina	0,22%
NaCl	0,87%
Fosfatodisodicohidrogenado	
Fosfosodicohidrogenado	
Agua para Inyección	

DESCRIPCION

Solución salina isotónica estéril acuosa de Riboflavina (Vitamina B2) color amarillo

INDICACIONES

Fortalecimiento Corneal

USOS

Solución Isotónica para Crosslinking Corneal

APLICACIÓN INTRAESTOMAL EN COMBINACION CON CON LASIK

1. Después de la ablación con excimer y antes de reemplazar el colgajo corneal aplique suficiente VibeX Xtra al lecho corneal para cubrir completamente el estroma expuesto.
2. Remoje durante 90 segundos. Enjuague el lecho corneal completamente con BSS.
3. Reemplace el colgajo corneal utilizando técnicas clínicas estándar.
4. Irrigue la córnea con BSS antes de la exposición a los rayos UVA a 30mW/cm² por 90 segundos a dosis de 2,7 J/cm².
5. Inicie el tratamiento UV.
6. Irrigue la córnea con BSS durante el tratamiento con UVA.
7. Complete el procedimiento Lasik utilizando técnicas clínicas estándar.

CONTRAINDICACIONES

Espesor corneal con epitelio menor de 375 μ m
Embarazo
Problemas de cicatrización epitelial
Queratotomía refractiva
Queratitis herpética
Trastornos reumáticos
Poca resistencia de la córnea
Sensibilidad a los componentes

ADVERTENCIAS

Producto de un solo uso.



Cualquier remanente del producto en la Jeringa debe ser desechado

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura inferior a 28°C y protegido de la luz solar.

Fabricado por AVEDRO Inc / USA - MEDIO-HAUS MEDIZINPRODUKTE GMBH / Alemania

Importado y Distribuido por INOFTAL INVESTIGACIONES E INNOVACIONES OFTALMOLOGICAS S.A.S.

Registro Sanitario INVIMA 2011DM-0007623